


Ta plats i bilsätet

Autoadapt | Hur du säkert och bekvämt tar plats i bilsätet.





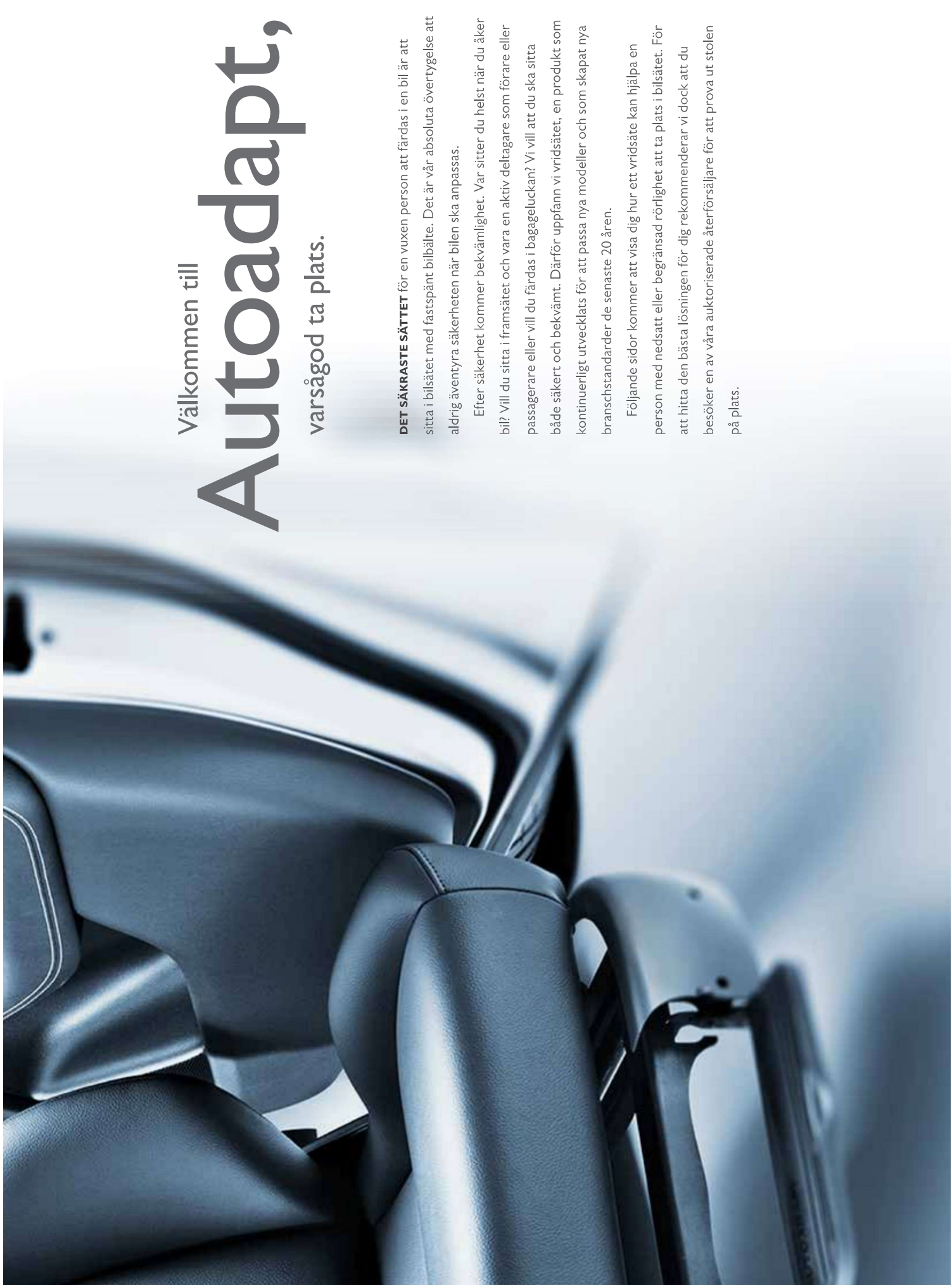

Välkommen till

Autoadapt,

varsågod ta plats.

DET SÄKRASTE SÄTTET för en vuxen person att färdas i en bil är att sitta i bilsätet med fastspänt bilbälte. Det är vår absoluta övertygelse att aldrig äventyra säkerheten när bilen ska anpassas.

Efter säkerhet kommer bekvämlighet. Var sitter du helst när du åker bil? Vill du sitta i framsätet och vara en aktiv deltagare som förare eller passagerare eller vill du färdas i bagageluckan? Vi vill att du ska sitta både säkert och bekvämt. Därför uppfann vi vridsätet, en produkt som kontinuerligt utvecklats för att passa nya modeller och som skapat nya branschstandarder de senaste 20 åren.

Följande sidor kommer att visa dig hur ett vridsäte kan hjälpa en person med nedsatt eller begränsad rörlighet att ta plats i bilsätet. För att hitta den bästa lösningen för dig rekommenderar vi dock att du besöker en av våra auktoriserade återförsäljare för att prova ut stolen på plats.



Skulle du kunna flytta över från rullstolen till bilsätet ...

... om bilsätet var delvis utanför bilen?




IBLAND ÄR ALLT som krävs några få centimeter av sätet utanför bilen för att göra det lättare för dig att sätta dig ner eller flytta över från rullstolen. Vi kan föra ut sätet utanför bilen genom att använda ett vridsäte som roterar ut ur fordonet. Denna lösning kallar vi Turnout och den finns i flera olika modeller för både förare och passagerare.

Snabbfakta Turnout

- Vidar bilsätet utåt för bättre tillgänglighet
- Finns i en manuell och en elektrisk version
- Kombinerar med Caroslide under Turnout för att optimera benutrymmet
- Finns för både höger och vänster sida
- Kombinerar med Tilda för att optimera huvud- och knäutrymmet
- Kombinerar med Carony för en överflyttning helt utan lyft
- Godkänd i både EMC-prov och krocktest
- CE-märkt

” I bilen är jag inte funktionshindrad, utan som vilken annan bilist som helst.

– Pelle Rittgård, Sverige

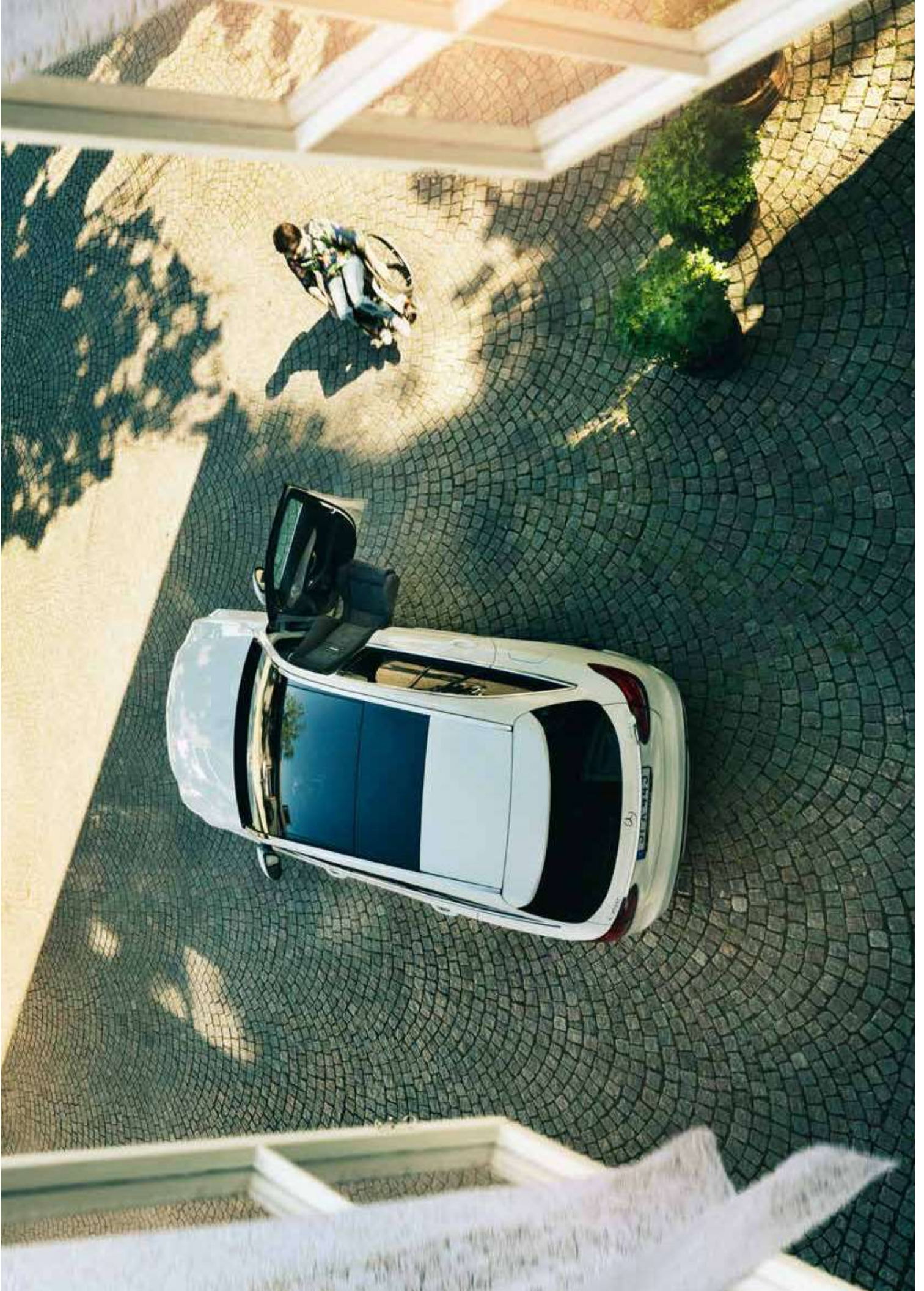

Skulle du kunna flytta över från rullstolen till bilsätet ...

... om bilsätet var nästan helt utanför bilen?



OM BILSÄTET ÄR ca 40 cm utanför bilen kan det vara mycket lättare att för dig att sätta dig ner eller flytta över från rullstolen. Vi kan föra ut sätet nästan helt utanför bilen genom att använda ett vridsäte som först roterar och sedan skjuts ut ur fordonet. Denna lösning kallar vi Turny Low Vehicle. För höga bilmodeller som t.ex. SUV, se vår lösning Turny.

Snabbfakta Turny Low Vehicle

- Gör det lätt att ta sig i och ur bilen
- Elektrisk justering av sätet i bilens längdriktning
- Bekvämt och tryckavlastande säte med bakåtlutning
- Godkänd i både EMC-prov och krocktest
- Skräddarsydd rörelse för att passa dig och din bil
- CE-märkt
- Begränsar inte lutningen av ryggstödet



Mer fördelar på
autoadapt.se



Skulle du kunna flytta över från rullstolen till bilsätet ... om hela sätet är utanför bilen på önskad höjd?

IBLAND RÄCKER DET inte att sätet är utanför bilen. Kanske vore det bättre för dig att ha hela sätet utanför bilen i samma höjd som din rullstol. För att uppnå detta kan Turny säteslyften vrida sätet ut ur bilen och sänka ned det till önskad höjd. Nu är det bara sätta sig ner i bilstolen eller göra en fullständigt hinderfri överflyttning från rullstolen. När du väl sitter på plats i bilsätet trycker du på fjärrkontrollen och Turny lyfter in dig till en säker och bekväm position i bilen.

Turny finns i flera modeller för både passagerare och förare. För låga bilmodeller som t.ex. en sedan, se vår lösning Turny Low Vehicle.

Turny Evo är Autoadapts mest avancerade säteslyft som passar i trånga utrymmen. Det integrerade fotstödet är standard.



Turny Orbit är en beprövad och tillförlitlig lösning som passar mycket bra i höga och rymliga fordon.



Snabbfakta Turny Evo

- Gör det enkelt för både förare och passagerare att ta sig i och ur bilen
- Skräddarsydd rörelse efter dina behov
- Avancerat klämskydd
- Begränsar inte lutningen av ryggstödet
- Elektrisk justering av sätet i bilens längdriktning
- Informativ handkontrollsskärm
- Godkänd i både EMC-prov och krocktest
- CE-märkt



Skulle du kunna flytta över från rullstolen till bilsätet ...

... om allt du behövde göra var att sitta kvar?



En vårdare roterar sätet ut ur bilen och dockar fast Carony-chassit.



Hela bilsätet, inklusive brukaren, skjuts lätt över till underredet och blir en del av rullstolen.



När underredet lossats sitter brukaren säkert och bekvämt i rullstolen.

EN ANNAN LÖSNING för att sätta sig i bilen är att helt ta bort lyftet under överflyttningen. Låt helt enkelt rullstolen förvandlas till bilsätet. För detta behöver du rullstolssystemet Carony och lite hjälp från en vårdare. Docka fast Carony-rullstolen och skjut in hela sätet i bilen. Utan att ens lämna sätet kan du nu njuta av en säker och bekväm färd i framsätet.

Carony-rullstolen fungerar som vilken normal rullstol som helst och överensstämmer med samma standarder och bestämmelser. Den finns både som manuell rullstol med antingen 12"- eller 24"-hjul eller eldriven rullstol med 12"-hjul. Carony-systemet fungerar tillsammans med både Turnout och Turny.



” Sedan 1998 använder vi Carony-systemet till min fru. Vi är väldigt tacksamma för denna underbara lösning som under de senaste 10 åren hjälpt oss undvika vårdhemmet och gjort det möjligt för oss att bo tillsammans.

– Horst Schneider, Tyskland

Snabbfakta Carony Classic

- Brukaren sitter bekvämt kvar i sätet under överflytten från Carony-rullstolen till bilen
- Godkänd som medicinskt hjälpmedel
- Flamsäkra säten
- Godkänd i både EMC-prov och krocktest
- CE-märkt
- Fungerar som en vanlig komfortrullstol
- Passar både barn och vuxna
- Finns för både höger och vänster sida
- 24"-bakhjul med snabbkoppling



Mer fördelar på
autoadapt.se

Andra produkter som hjälper dig att ta plats i bilsätet.




SÄTEN

- 1. COMPACT SEAT** är ett bekvämt bilsäte med låg profil. Den stora designfördelen är dess förmåga att smälta in i bilens inredning. Det är också ett säkert och ekonomiskt alternativt till andra säten med fler funktioner.
- 2. RECARO SEAT** är ett lågbyggt skålformat säte.
- 3. BEV SEAT** är ett lågbyggt säte speciellt utformat för individuell anpassning med hjälp av olika
- BEV-tillbehör.** Borttagbara mittdynor i ryggstöd och säte.
- 4. BEV SEAT KIDS** ger stöd för ett barn som växer, med sin justerbara nackdyna och bälstöd.
- 5. GS SEAT** är den mest avancerade stolen som växer med barnet. Sätet har ett stor antal tillval och funktioner för att garantera en exakt individuell anpassning.



LUTNINGSFUNKTION

TILDA gör att sätet kan lutas bakåt i tre steg. Detta ger mer huvudutrymme när man åker in eller ur fordonet med Carony eller Turny. Som tillval finns ett fotstöd som hjälper dig att få fötterna över tröskeln när stolen vrids. Som en positiv sidoeffekt kan lutningen av sätet avlasta kroppen vid en längre tids sittande.

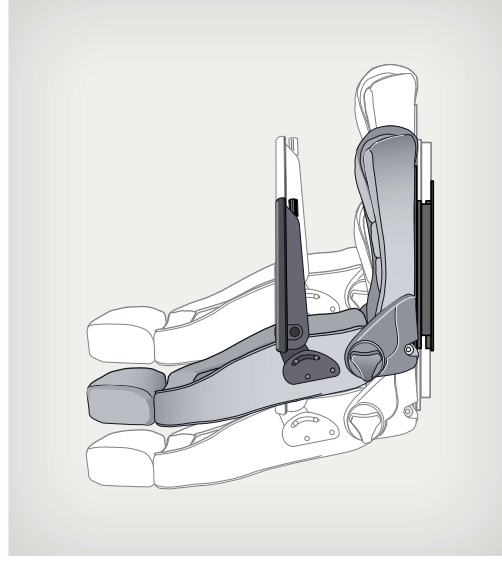

JUSTERING I LÅNGDRIKTNINGEN

CAROSLIDE är en eldriven glidskena för sätet som ger dig det där extra benutrymmet som krävs när stolen vrids in och ut. Eller bara för en mer bekväm sittställning.

Autoadapt världsomspännande mobilitetslösningar.

AUTOADAPT GRUNDADES 1996 och har sedan dess vuxit till en av världens ledande tillverkare av bilanpassningslösningar för personer med nedsatt eller begränsad rörlighet. Idag är Autoadapt representerat i över 50 länder världen över, med mer än 300 utbildade Autoadapt-återförsäljare och ett nätverk av ytterligare ca 700 underåterförsäljare. Autoadapts huvudkontor, utvecklings- och produktionsanläggning är belägna i Stenkullen, strax utanför Göteborg.

Sedan april 2014 är Autoadapt ensam ägare till det brittiskbaserade företaget Unwin. Ett brytande fokus på säkerhet har gjort Unwin till världsledande leverantör av rullstolsförankringar och personskydd. Tillsammans med våra delägare BraunAbility och Bruno är Autoadapt den ledande globala leverantören av säkra bilanpassningslösningar för personer med nedsatt eller begränsad rörlighet.



FÖR ATT GARANTERA din och alla våra brukares säkerhet är Autoadapts produkter konstruerade och testade enligt gällande direktiv och standarder. Genom att arbeta tillsammans med brukare, organisationer, fordonsindustrin och andra berörda parter tänjer vi ständigt på gränserna för att du ska kunna välja den bil du vill, för att resa så säkert som möjligt och leva ett mer mobilt och oberoende liv.





VÅRA EXPERTOMRÅDEN

PÅ AUTOADAPT HJÄLPER vi människor att

göra det många tar för givet: köra till jobbet, sticka ner till affären, hälsa på hos vänner eller ge sig ut på en bilsemester. Det är med stolthet vi tillverkar lösningar som människor världen över sätter sin tillit till, varje dag. För att hitta den lösning som passar dina behov tittar du helt enkelt under motsvarande expertområde.

Du läser vår broschyr om att ta plats i bilsätet. En kort introduktion av våra övriga expertområden hittar du nedan.



RULLSTOLSLYFTAR

BRAUNABILITY har lösningen för att få in både dig och din rullstol i bilen med hjälp av en rullstolslyft. BraunAbility är världens ledande rullstolslyfttillverkare och delägare i Autoadapt.



OBEROENDE FÖRARE

ATT ANVÄNDA FOTPEDALER blev av någon anledning standardsättet att köra bil för nästan hundra år sedan. Lyckligtvis kan vi ändra på detta och många andra hinder för att låta dig greppa ratten och köra en sväng.



LYFTA OCH LASTA

INNAN DU KÖR IVÄG vill du förmodligen se till att du får med dig rullstolen. Oavsett dess storlek och modell så finns det en lösning för att lasta och transportera din rullstol på ett säkert sätt.



RULLSTOLSFÖRANKRINGAR

VÅR DELÄGARE Unwin har i över 50 år varit en banbrytande tillverkare av världsledande rullstolsförankringar och personsäkerhetslösningar. Även idag försätter Unwin att presentera innovativa konstruktioner samtidigt som man ligger i framkant av internationella säkerhetsstandarder.

”Rullstolen gör att jag
kan gå, med bilen
kan jag kan springa.

— Mona Nordell, Oberoende förare.

Autoadapt är stolt leverantör till oberoende
till förare och passagerare jorden runt.

Se deras berättelser på: autoadapt.se/kundberättelser

www.autoadapt.se

facebook.com/autoadapt

twitter.com/autoadapt

AUTOADAPT AB

Åkerivägen 7

SE-443 61 Stenkullen

Sverige

Telefon: +46 302 254 00

e-post: info@autoadapt.com



Worldwide Safe Mobility Solutions

Included in our corporate group are Autoadapt,
BraunAbility, Bruno, Unwin and Foca-Braun.

Illustrationer, beskrivningar och specifikationer i broschyren är baserade på aktuell produktinformation.
Autoadapt förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande. © 2015 Autoadapt AB